

Handleiding voor monsterafname

Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket.

Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapie-advies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzender-etiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapie-advies. NB: Aan particulieren worden nooit therapie-adviezen verstrekt.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klik op het tabblad „uitslag opvragen“. Onder „uitslag opvragen“ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **088-0075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen- of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Gamed HealthCare
Borculo*

*Telefoon: +31-(0)88-00 75 777
of info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Eerste straal ochtendurine

Vooraf: Lees eerst de handleiding **helemaal** door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Urinebuisje (monovette)
incl. etiket en geel tuitje
- 1 Urinebeker
- 1 verzendbuisje
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

STI

STI Plus

*(sexual transmitted infections;
seksueel overdraagbare infecties)*



De verzending moet plaatsvinden op maandag of dinsdag (voor de buslichting) en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Stop het monster bij extreme hitte of vorst niet in de brievenbus, maar geef het monster af op het postkantoor.

Test-Voorbereiding

1. We adviseren u om op de avond voor de monsternaam en 's nachts het nuttigen van grote hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) te vermijden.
2. Voor het opvangen van de eerste straal ochtendurine, mag gedurende ongeveer 6 uur ('s nachts) geen urine worden uitgescheiden.

Houd rekening met het volgende:

Als u na middernacht moet plassen en er zijn ongeveer 6 uur verstreken sinds de laatste keer plassen, dan kan ook dit urinemonster gebruikt worden.

Z.O.Z.

Test-Uitvoering

1. Als monster wordt de eerste straal urine van de eerste ochtendurine gebruikt.
2. Vang de allereerste 15-20 ml van uw ochtendurine op in de urinebeker en laat vervolgens de rest in het toilet lopen.
3. Pak nu het gele tuitje en het gele urinebuisje, draai het voorste deel van de gele dop eraf en zet het tuitje erop.
4. Doop het gele tuitje in de urine en neem met dit buisje een deel van de urine uit de urinebeker door van achter de stempel volledig uit te trekken. Het urinebuisje moet volledig gevuld worden.
5. Haal het gele tuitje ervan af en sluit vervolgens het urinebuisje weer zorgvuldig met de gele dop.
6. Breek de uitgetrokken stempel bij het afbreekpunt af zodat deze niet meer uitsteekt.
7. Doe het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het verzendbuisje goed.
8. Het tuitje, de afgebroken stempel en de urinebeker kunt u bij het huisvuil doen.
9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de verzendvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet op maandag of dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week-einde of voor feestdagen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Uw medivere-team



medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Gamedi Healthcare
Borculo

Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl